

# Pola Day



Your Smile. Our Vision.



2 fois 30 minutes  
par jour  
OU  
1 fois 45 minutes  
par jour

Poladay à 6% de peroxyde d'hydrogène  
1 seringue de 1.3g

Ces gels blanchissants à viscosité élevée et pH neutre constituent pour le patient un kit ambulatoire au confort optimal.

La combinaison exceptionnelle fortement hydratée de principes actifs, apaisants et traitants, permet de réduire la sensibilité et de freiner significativement la formation de plaque et de caries.

### Agent apaisant et traitant naturel

L'ajout d'additifs spéciaux réduit la formation de plaque et stimule la reminéralisation pour une sensibilité moindre. Les propriétés antibactériennes aident à reconstituer l'émail dentaire.

### Forte hydratation

Ce gel fortement hydraté réduit la déshydratation de l'émail et par conséquent la sensibilité du patient.

### Épaississant à haut poids moléculaire

Cela réduit à la fois la sensation d'humidité et l'effet asséchant du gel au bénéfice d'une sensibilité moindre.

### Viscosité élevée

Le gel à haute viscosité se place aisément et en toute sécurité dans la gouttière où il se fixe pour toute la durée du port.

### Goût

Le gel a un goût agréable de menthol à effet durable et avec une sensation de fraîcheur.

### Libération de fluor

L'adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

### Contient un agent désensibilisant


Le gel Pola Day contient un agent désensibilisant qui bloque l'influx nerveux entre la pulpe et la dentine. Ils permettent donc de réduire la sensibilité pour un confort optimal du patient.

### pH neutre

Le pH neutre de Pola Day facilite une libération complète du peroxyde sans compromettre le confort du patient.



## MODE D'EMPLOI

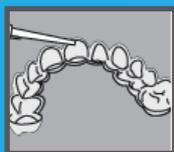

1. Déposer une gouttelette de gel dans chaque réservoir de la gouttière pour les dents à traiter.



2. Mettre en place la gouttière avec le gel sur les dents.



3. Retirer le surplus de gel avec un tissu ou une brosse souple et sèche.



4. Après le traitement, retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche à l'eau tiède.



5. Brosser les dents

RESPECTE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE EN DOSAGE EN DE PEROXYDE D'HYDROGENE