

Pola Office +



Your Smile. Our Vision.



Pola à 37.5% de peroxyde d'hydrogène
1 Seringue de 2.8 mL Pola Office+1 Seringue 1g de barrière gingivale
+Accessoires

Traitement
de
30 minutes
seulement!

Le plus rapide au monde

Temps réduit au fauteuil. Durée totale du traitement: moins de 30 minutes.

En passant moins de temps au fauteuil, le patient est plus confortable et cela est plus rentable pour le cabinet.

La formule unique à 37,5% de peroxyde d'hydrogène permet de libérer rapidement les ions peroxyde pour démarrer le processus de blanchiment.

Ne nécessite pas de lampe

Pola Office + peut être utilisé avec ou sans lumière, car il n'a pas besoin d'activation.

Bien que la lumière ne soit pas nécessaire, vous pouvez également utiliser une lampe de blanchiment ou une lampe à photopolymériser classique pour accélérer le processus éclaircissement et pour impressionner vos patients.

Confort optimal

Grâce à son pH neutre, Pola Office+ garantit un confort optimal per et post opératoire. Le temps de traitement raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité dentaire du patient.

Désensibilisant intégré

Pola Office+ bénéficie d'un désensibilisant intégré limitant la sensibilité post opératoire. L'analgésique principal (le nitrate de potassium) inhibe, l'influx nerveux qui accroît la sensibilité, et produit ainsi un effet calmant.

Extrusion facile

Ne nécessite aucun mélange. Le système de double seringue auto-mélangeuse permet le mélange au moment de l'application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit une préparation homogène du gel fraîchement activé. L'embout fin facilite l'application, particulièrement dans les espaces étroits.

Une couche fine suffit!

Nécessite uniquement une fine couche de gel. Utilisez l'embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. Grâce à sa viscosité, le gel adhère à la surface de la dent et optimise l'effet blanchissant.

"89% des opérateurs sont prêts à recommander Pola Office+ à leurs collègues"

MODE D'EMPLOI

1. Enregistrer la teinte préopératoire.
2. Nettoyer les dents avec une pâte à base de pierre ponce.
3. Mettre en place l'écarteur de lèvre puis enduire de vaseline la surface des lèvres qui sera exposée.
4. Sécher les dents et appliquer de la barrière gingivale. Photopolymériser en effectuant des mouvements de balayage.
5. Fixer fermement un embout de mélange à la seringue Pola Office+ à l'écart du patient. Verser une petite quantité de gel sur le mélangeur afin d'assurer un mélange adéquat.
6. Appliquer directement une fine couche de gel sur toutes les dents à traiter.
7. Laisser reposer le gel sur les dents pendant 8 minutes. Vous pouvez utiliser la lampe à photopolymériser en suivant les instructions du fabricant.
8. Éliminer le matériau à l'aide de l'aspiration.
9. Effectuer les étapes 6 à 8 trois fois (quatre, le cas échéant).
10. Après la dernière application, éliminer tout le gel, puis rincer et aspirer.
11. Retirer la barrière gingivale.